



Onkologas



Patologas



Roche / FMI



**1. Užpildykite FoundationOne Užsakymo formą**

Norėdami gauti Užsakymo formą, kreipkitės į Roche atstovą arba Roche Klientų aptarnavimo centrą tel. 8 800 20505 arba e-adresu [Lithuania.foundationone@roche.com](mailto:Lithuania.foundationone@roche.com)



**2. Informuokite gydytoją patologą, kad norėsite užsakyti tyrimą**

Gydytojas onkologas turi informuoti gydytoją patologą, kai nusprendžia užsakyti FoundationOne tyrimą.



**3. E-paštu išsiųskite Užsakymo formą į Roche Klientų aptarnavimo centrą**

Užpildyta forma turi būti siunčiama adresu: [lithuania.foundationone@roche.com](mailto:lithuania.foundationone@roche.com). Kai užsakymas bus priimtas, gydytojai onkologas ir patologas e-paštu gaus informaciją apie užsakymo patvirtinimą.



**4. Paimkite tiriamosios medžiagos mėginį**

Gydytojas onkologas siunčia tiriamąją medžiagą gydytojui patologui mėginio paruošimui (ignoraukite šį žingsnį, jei gydytojas patologas jau turi paciento tiriamąją medžiagą).



**5. Paruoškite tiriamosios medžiagos mėginį**

Gydytojas patologas mėginį paruošia pagal Foundation Medicine nurodytas gaires. Mėginio paruošimo instrukcija atsiunčiama gydytojui patologui e-paštu.



**6. Užpildykite Paraiškos formą**

Paraiškos forma turi būti užpildyta ir įdėta į pakavimo dėžę kartu su tiriamuoju mėginiu. Paraiškos forma bus atsiunčiama e-paštu. Paraiškos formoje yra nurodytas, atsekamumui svarbus, tyrimo ID. Jei pamestumėte Paraiškos formą kreipkitės telefonu 8 800 20505, arba e-adresu [Lithuania.foundationone@roche.com](mailto:Lithuania.foundationone@roche.com)



**7. Iškviškite UPS kurjerį**

UPS kurjerį galite iškviešti skambindami Roche Klientų aptarnavimo centro telefonu 8 800 20505.



**8. Supakuokite mėginį ir perduokite jį UPS kurjeriui**

Mėginys turi būti tinkamai paruoštas gabenimui ir perduotas UPS kurjeriui laikantis Pakavimo instrukcijos. Pakavimo instrukciją gausite e-paštu.



**9. Mėginio tyrimai ir analizė**

Mėginio ištyrimas, analizė, įvertinimas bei galutinio atsakymo paruošimas gali užtrukti 11-14 dienų nuo mėginio pristatymo į Foundation Medicine laboratoriją.



**10. Tyrimo atsakymo gavimas**

Tyrimo atsakymas atsiunčiamas gydytojui onkologui Paraiškos formoje nurodytu e-paštu.



**11. Tyrimo atsakymo aptarimas su pacientu**

Gydantis gydytojas tyrimo atsakymą aptaria su pacientu.



**12. Tiriamosios medžiagos likučio grąžinimas, (jei įmanoma)**

Audinis, kuris nebuvo panaudotas tyrimui, bus parsiuočiama atgal gydytojui patologui Paraiškos formoje nurodytu adresu. Tai bus daroma tokiu atveju, jei buvo siųsti tiriamosios medžiagos blokai.

Jei turite klausimų, kreipkitės į Roche Klientų aptarnavimo centrą: 8-800-20505. Centro darbuotojai bendrauja anglų kalba.